

## Manuel d'utilisation


### Trulicity® 0,75 mg solution injectable en stylo pré-rempli dulaglutide

ROMPRE  
LA PARTIE  
SCÉLÉE



ROMPRE  
LA PARTIE  
SCÉLÉE

← Déplier et ouvrir à plat →

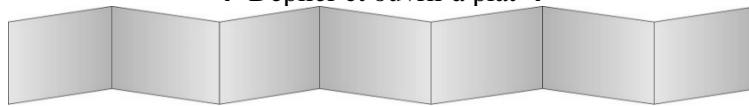

Lire les deux côtés pour prendre connaissance de toutes les instructions

## À PROPOS DE TRULICITY EN STYLO PRÉ-REMPI

**Veillez lire attentivement et intégralement ce manuel d'utilisation et la notice avant d'utiliser votre stylo pré-rempli. Demandez à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère comment injecter Trulicity correctement.**

- Le stylo est un dispositif d'administration pré-rempli jetable prêt à l'emploi. Chaque stylo contient une dose hebdomadaire de Trulicity (0,75 mg). Chaque stylo délivre une dose unique.
- **Trulicity est à administrer une fois par semaine.** Vous pouvez noter sur un calendrier la date de l'injection suivante pour vous en rappeler.
- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'injection vert, le stylo insère automatiquement l'aiguille **dans votre peau**, injecte le médicament et rétracte l'aiguille **une fois l'injection terminée**.

## AVANT DE COMMENCER

### Sortir

du réfrigérateur.

Laisser le capuchon de la base jusqu'à ce que vous soyez prêt pour l'injection.

### Vérifier

l'étiquette pour être sûr que vous prenez le bon médicament et que la date de péremption n'est pas dépassée.

### Inspecter


le stylo. Ne pas l'utiliser si vous remarquez que le stylo est endommagé, que le médicament est trouble, présente une coloration anormale ou contient des particules.

### Préparer


l'injection en vous lavant les mains.

## CHOISIR VOTRE SITE D'INJECTION

- Votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère peut vous aider à choisir le site d'injection qui vous convient le mieux.
- L'injection peut être effectuée dans le ventre (abdomen) ou la cuisse.
- L'injection peut être effectuée dans le haut du bras si c'est une autre personne qui vous la fait.
- Changez (alternez) de site d'injection chaque semaine. Vous pouvez utiliser la même zone du corps, mais vous devez utiliser un site d'injection différent dans cette zone.

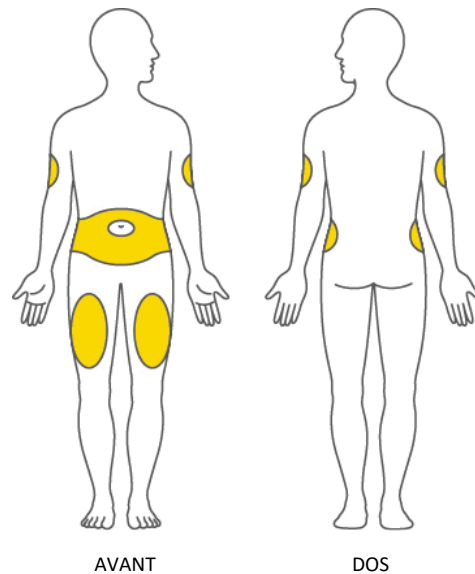

1. **RETIRER LE CAPUCHON**
2. **POSITIONNER ET DÉVERROUILLER**
3. **APPUYER ET MAINTENIR ENFONCÉ**

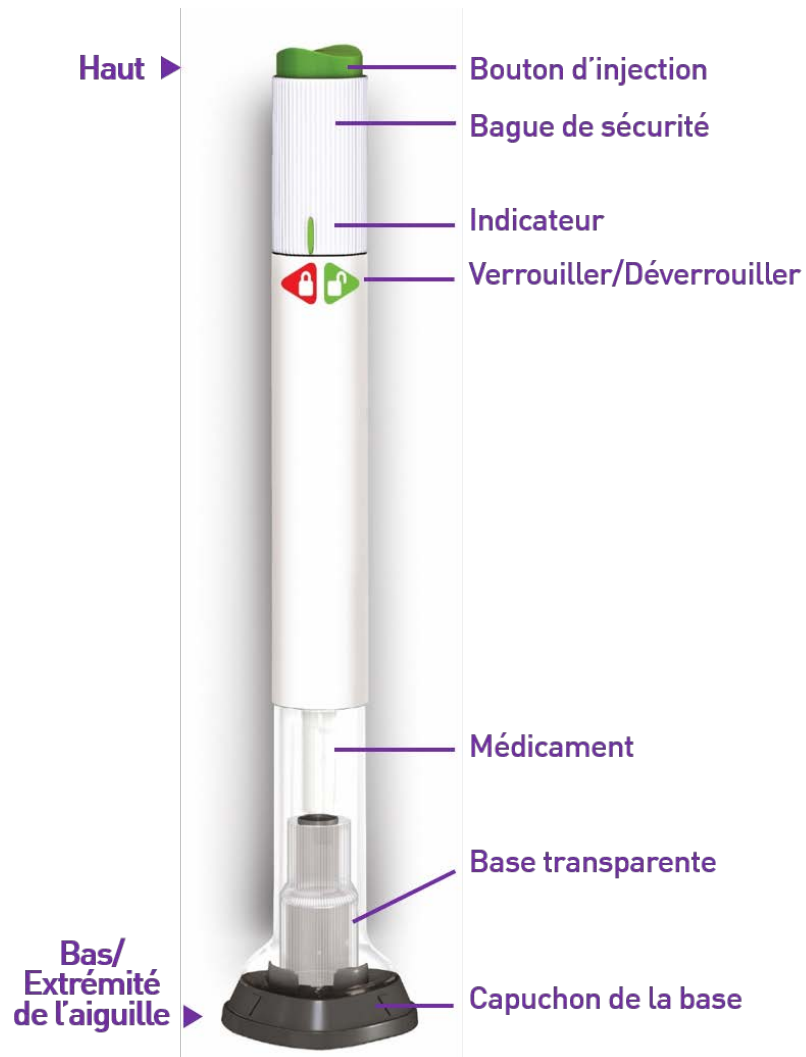


## 1 RETIRER LE CAPUCHON

- Vérifiez que le stylo est **verrouillé**.
- Retirez le capuchon gris de la base.

**Ne remettez pas le capuchon de la base en place, cela risquerait d'endommager l'aiguille. Ne touchez pas l'aiguille.**

- Une fois retiré, le capuchon gris de la base apparaît comme montré sur l'image et peut être jeté.

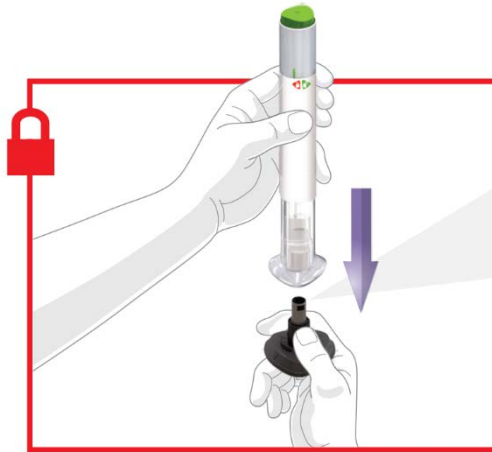

← **Capuchon gris de la base**


Si le capuchon gris de la base ne ressemble pas à l'image ci-dessus :

- **N'utilisez pas** le stylo.
- Conservez de manière sécurisée le stylo et le capuchon, et contactez Lilly.
- Utilisez un nouveau stylo.

## 2 POSITIONNER ET DÉVERROUILLER


- Placez la base transparente à plat fermement contre la peau au niveau du site d'injection.

- **Déverrouillez** en tournant la bague de sécurité.

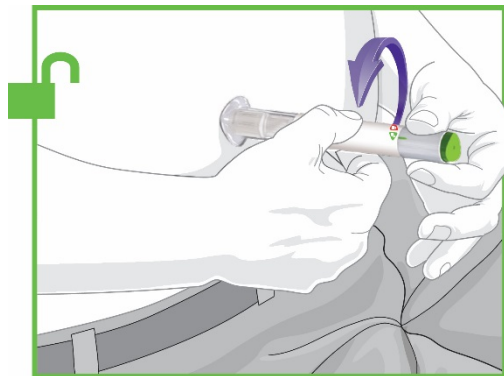

## 3 APPUYER ET MAINTENIR ENFONCÉ

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'injection vert ; vous devez entendre un clic.

-  Continuez à maintenir à plat la base transparente fermement contre votre peau jusqu'à entendre un deuxième clic. Ce clic indique que l'aiguille s'est rétractée. Cela peut prendre environ 5-10 secondes.
- Retirez le stylo de votre peau.



- **La partie grise visible confirme que l'injection est bien effectuée.**

## INFORMATIONS IMPORTANTES

Conservation et manipulation  
Élimination du stylo  
Questions fréquemment posées  
Autres informations  
Informations complémentaires

## CONSERVATION ET MANIPULATION

- Certaines parties du stylo sont en verre. Manipulez-le avec précaution. Si vous le faites tomber sur une surface dure, ne l'utilisez pas. Utilisez un nouveau stylo pour l'injection.
- Conservez votre stylo au réfrigérateur.
- Si vous ne pouvez pas conserver le stylo dans un réfrigérateur, vous pouvez le garder à température ambiante (moins de 30 °C) pendant 14 jours maximum.
- Ne congelez pas votre stylo. Si le stylo a été congelé, NE L'UTILISEZ PAS.
- Conservez le stylo dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière.
- Tenir le stylo hors de la vue et de la portée des enfants.
- Pour des informations complètes sur la conservation de Trulicity, veuillez lire la notice.

## ÉLIMINATION DU STYLO

- Jetez le stylo dans un container à aiguilles ou remettez-le directement à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère.
- Ne recyclez pas un container à aiguilles utilisé.
- Demandez à votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère comment se débarrasser des médicaments que vous n'utilisez plus.



## QUESTIONS FREQUEMMENT POSÉES

### Que dois-je faire si je vois des bulles d'air dans mon stylo ?

La présence de bulles d'air est normale. Ceci n'est pas dangereux et n'affectera pas votre dose.

### J'ai déverrouillé le stylo et appuyé sur le bouton d'injection vert avant de retirer le capuchon de la base, que dois-je faire ?

Ne retirez pas le capuchon de la base et n'utilisez pas le stylo. Jetez le stylo comme vous l'a indiqué votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Procédez à votre injection avec un autre stylo.

### Il y a une goutte de liquide au bout de l'aiguille quand je retire le capuchon de la base, est-ce normal ?

Il est normal qu'il y ait une goutte de liquide au bout de l'aiguille ; cela n'affectera pas la dose.

### **Faut-il maintenir le bouton d'injection enfoncé jusqu'à la fin de l'injection ?**

Cela n'est pas nécessaire, mais peut vous aider à maintenir le stylo à plat et fermement contre votre peau.

### **J'ai entendu plus de deux clics pendant mon injection, deux forts et un plus faible. L'injection a-t-elle été complète ?**

Certains patients peuvent entendre un petit clic juste avant le deuxième clic fort. Il s'agit du fonctionnement normal du stylo. Ne retirez pas le stylo de votre peau avant d'avoir entendu le second clic fort.

### **Il y a une goutte de liquide ou de sang sur ma peau après l'injection. Est-ce normal ?**

Cela peut arriver et n'a pas d'effet sur la dose.

### **Je ne suis pas sûr que le stylo ait fonctionné correctement.**

Vérifiez que la dose a bien été injectée. La dose a été délivrée correctement lorsque la partie grise est visible (voir Etape 3). Pour plus d'instructions, contactez votre représentant Lilly local mentionné dans la notice. En attendant, conservez votre stylo dans un endroit sûr pour éviter toute piqûre accidentelle avec l'aiguille.

## **AUTRES INFORMATIONS**

- Si vous avez des problèmes de vue, N'utilisez PAS le stylo sans l'aide d'une personne formée à l'utilisation du stylo Trulicity.

## **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

- Pour toute question sur le stylo Trulicity ou en cas de problème, contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.



**SCANNER CE CODE**  
**[www.trulicity.eu](http://www.trulicity.eu)**

**Date de révision : janvier 2021**