



CACHE-AIGUILLE

A UTILISER AVEC DES CARTOUCHES D'UMATROPE® / HUMATROPE®

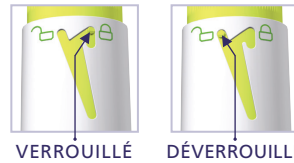

Tournez la partie amovible sur la position verrouillée/déverrouillée

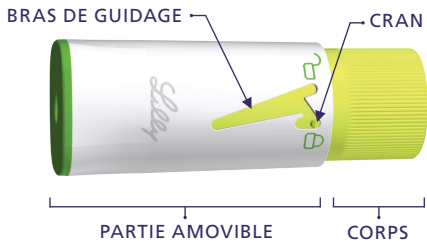

Lilly

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

FIXATION ET UTILISATION DU CACHE-AIGUILLE

Le cache-aiguille vous permet de réaliser l'injection sans voir l'aiguille. Assurez-vous que la préparation du stylo est réalisée selon les instructions du manuel d'utilisation du stylo.

Quels types d'aiguilles peuvent être utilisées avec le cache-aiguille ?


- Les aiguilles ne sont pas fournies. Vous pourriez avoir besoin d'une prescription pour que le pharmacien vous délivre les aiguilles.
- Les aiguilles Becton, Dickinson and Company (BD) sont recommandées pour l'utilisation de votre stylo HumatroPen®.
- L'utilisation du cache-aiguille avec votre stylo HumatroPen n'est pas obligatoire. Lors de l'utilisation du cache-aiguille avec votre stylo HumatroPen, vous devez utiliser une aiguille d'une longueur minimale de 5 mm. Veuillez vous référer aux instructions du manuel d'utilisation du cache-aiguille.
- Demandez conseil à votre médecin, pharmacien ou infirmier(ère) concernant le calibre et la longueur d'aiguille les plus adaptés pour vous.

- 1 Assurez-vous que le capuchon du stylo est retiré. Fixez une nouvelle aiguille et enlevez le capuchon extérieur et le capuchon intérieur.

- 2 Vérifiez que le cache-aiguille est en position verrouillée. Si ce n'est pas le cas, verrouillez le cache-aiguille en tournant, et non en poussant, la partie amovible et en positionnant le cran au sein du bras de guidage tel que montré sur le schéma.




- 3 Insérez la cartouche avec l'aiguille fixée de façon droite dans le cache-aiguille en poussant fermement jusqu'à la butée. Sélectionnez votre dose habituelle. Prenez soin de ne pas vous piquer avec l'aiguille.

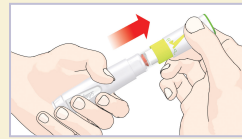

- 4 Déverrouillez le cache-aiguille en tournant la partie amovible dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le cache-aiguille soit en position déverrouillée, avec le cran situé au sein du bras de guidage tel que montré sur le schéma. Prenez soin de ne pas appuyer sur la partie amovible après avoir déverrouillé le cache-aiguille pour éviter les piqûres accidentelles avec l'aiguille.



- 5 Injectez la dose d'Umatrope®/Humatrope® selon les recommandations de votre médecin, pharmacien ou infirmier(ère). Tout d'abord, insérez l'aiguille en l'enfonçant dans la peau avec un angle de 90°. La partie amovible recouvrira le corps du cache-aiguille au moment où l'aiguille s'enfoncera dans la peau.

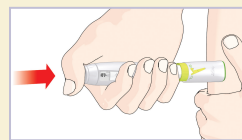

Puis pressez le bouton d'injection. Le cache-aiguille va automatiquement se verrouiller dès que vous retirerez l'aiguille de la peau.

- 6 Assurez-vous que le cache-aiguille est revenu en position verrouillée. Tirez soigneusement et de façon bien droite le cache-aiguille et retirez-le du stylo.



Retirez et jetez l'aiguille selon les recommandations de votre médecin, pharmacien ou infirmier(ère).

Remettez le capuchon du stylo.

Les parties salies peuvent être nettoyées avec un chiffon humide. N'UTILISEZ PAS d'alcool ou d'autres agents de nettoyage.




0344



Eli Lilly and Company
Pharmaceutical Delivery Systems
639 S Delaware St,
Lilly Corporate Center
Indianapolis, IN 46285, USA

Importateur :
Lilly S.A.
Avenida Industria 30
28108 Alcobendas
Madrid, Espagne

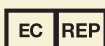

Eli Lilly Nederland B.V.
Papendorpseweg 83
3528 BJ Utrecht
Pays-Bas

Humatrope®, Umatrope® (France) et HumatroPen® sont des marques déposées de Eli Lilly and Company

Copyright © 2008, 2018 Eli Lilly and Company. Tous droits réservés.

Date de révision : Avril 2018

Lilly